



nal von minden

Drug-Screen® Kratom rychlý test

Rychlý test pro analýzu moči, cut-off: 100 ng/mL

Strom s vysokým potenciálem závislosti

Mitragyna speciosa, známý také jako strom kratom nebo červený sentol, pochází z jihovýchodní Asie. Dorůstá do výšky až 12 metrů, má žluté okvětní lístky a velké, hladké, oválné listy. Každý strom však také obsahuje různé alkaloidy, například psychoaktivní látky mitragynin a 7-hydroxy-mitragynin. Vzhledem k psychoaktivním, analgetickým účinkům při vazbě na opioidní receptory představuje kratom díky svým vlastnostem podobným morfinu riziko potencionálního vzniku závislosti.

V tradiční medicíně jihovýchodní Asie se kratom používá při léčbě průjmu. Kromě toho, že působí jako stimulant a intoxikant, používá se tato látka i k léčbě abstinčních příznaků při vysazení opiátů. V malých dávkách může mít kratom povzbuzující a euforizující účinek, zatímco vysoké dávky způsobují sedaci. Kratom je možno žvýkat, konzumovat jako čaj nebo kouřit. Jeho hořká chuť často zmírňuje nevolnost a zvracení, může ale také způsobit sucho v ústech, nechutenství a zácpu. V některých případech může vést i k srdečním a oběhovým potížím.

Náš rychlý test

nal von minden Drug-Screen® Kratom rychlý test je kompetitivní imunochromatografický test určený ke kvalitativnímu stanovení mytragininu v lidské moči. Lze jej použít jako pomůcku při provádění či sledování terapeutických opatření. Jelikož jde o *in-vitro* diagnostiku pro profesionální použití, poskytuje test vizuální, předběžný analytický výsledek.


Stručný přehled Vašich výhod:

- ✓ Doba detekce: 1-5 dnů
- ✓ Jednoduchá obsluha
- ✓ Rychlé a spolehlivé výsledky testu za pouhých 5-10 minut
- ✓ Minimální trvanlivost 11 měsíců

Provedení testu



Namočte testovací proužek do moči až po odpovídající značku (MAX) po dobu **10-15 vteřin**. Tekutina by neměla přesáhnout značku MAX.

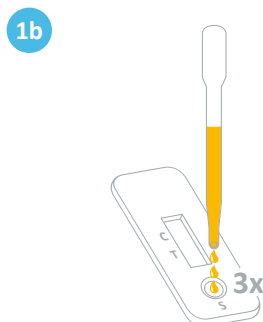

Přidejte 3 kapky do moči (cca 120 µL) do každého otvoru pro vzorek. Zajistěte, aby se moč nedostala do kontaktu s reakčním polem.



Výsledek testu odečtete **po 5 minutách**. Pozitivní výsledek se doporučuje potvrdit po 10 minutách.

Vyhodnocení výsledků



Podrobnější popis naleznete v návodu k použití.

nal von minden Drug-Screen® Kratom rychlý test

Rychlý test pro analýzu moči, cut-off: 100 ng/ml

Produkt	Formát	Vzorek	Parametr/Cut-off (ng/mL)	Obj. č.	Velikost balení
Drug-Screen KRA100 rychlý test	Testovací proužek	Moč	100 ng/mL	101099V	50 testů
Drug-Screen KRA100 rychlý test	Testovací kazeta	Moč	100 ng/mL	102099V	30 testů

Náš **český tým** Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy na telefonním čísle **800 143 685** (bezplatné číslo z pevné linky) nebo na czech@nal-vonminden.com

We help you care!

